

BACKHOME®

Identificación Animal – Microchip y Lector



ESPECIES DE DESTINO

Perros, gatos, animales exóticos.

INDICACIONES

El microchip de identificación electrónica BackHome® es un dispositivo que se implanta bajo la piel de las mascotas con un simple, seguro y rápido procedimiento. Una vez aplicado el microchip BackHome, la mascota quedará identificada con un número único e irrepetible en forma permanente con un código de 15 dígitos, de uso internacional. **Importante: la medida del microchip es de 1,25x8,3mm.**

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

1. Asegúrese mediante un lector BackHome® que el animal no haya sido anteriormente identificado mediante un microchip.
2. Comprobar la integridad de la bolsa esterilizada.
3. Antes de abrir la bolsa, escanee el microchip que va a ser implantado. Compruebe que el número de microchip que aparece en la pantalla del lector corresponda con el impreso en los adhesivos incluidos en la bolsa esterilizada. El microchip va dentro de la aguja implantadora.
4. Abrir la bolsa esterilizada y quitar el tapón de plástico que protege la aguja.
5. Localizar el lugar correcto para la implantación (de preferencia la cruz del animal).
6. Mantener en todo momento **las condiciones de asepsia**. Levantar el pliegue subcutáneo en el lugar de implantación e insertar la aguja hasta el máximo de su longitud. Apretar el émbolo completamente hasta expulsar el microchip. El sistema click "anti-retorno" asegura que el microchip no sea aspirado dentro de la aguja después de la implantación.
7. Escanear nuevamente el microchip implantado.
8. Depositar tanto la aguja como el cuerpo de la jeringa en los contenedores destinados para tales efectos.

CERTIFICADOS, BASE DE DATOS Y ETIQUETAS CON CÓDIGO DE BARRA

Se incluyen 10 certificados (original y copia), en cada caja. La base de datos es administrada en la página www.centrovet.com/registrodemascotas. El código del microchip se incluye en 6 etiquetas adhesivas con el código de barra correspondiente. La etiqueta se puede pegar en cualquier documento que se estime conveniente.

ESTANDAR ISO:

El sistema microchip BackHome® cumple con estándar internacional ISO 11784 e ISO 11785

CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y ADVERTENCIAS

No tiene.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, entre 15° y 30° C.

PRESENTACIÓN

Caja con 10 jeringas esterilizadas conteniendo 1 microchip cada una. Caja con 1 lector.

FT0189NAC13062022R1V1.

